

Установка и настройка ПО Дисофт

1. Скачайте дистрибутив **disoft.deb**
2. Откройте папку, содержащую скачанный дистрибутив, через файловый менеджер
3. Дважды щёлкните по загруженному файлу дистрибутива, чтобы запустить установку.
4. При появлении запроса системы безопасности введите пароль пользователя для подтверждения установки.
5. В открывшемся окне нажмите кнопку **«Установить пакет»**.
6. Дождитесь завершения установки.
7. После установки запустите приложение **Disoft** через меню приложений.
8. В окне настроек выберите тип плоскопанельного детектора.